

Siringhe con aghi di sicurezza

ISTRUZIONI PER L'USO

Assicurarsi che la connessione dell'ago alla siringa sia stabile e sicura.

Arretrare il dispositivo di protezione. Impugnare la siringa con una mano e con l'altra rimuovere il cappuccio copri-ago. Utilizzare la siringa per somministrazione o prelievo in conformità con il protocollo prestabilito.

Attivare il dispositivo di sicurezza immediatamente dopo l'iniezione. Posizionare il dito pollice o indice sugli appositi alloggiamenti zigrinati e spingere il cappuccio di protezione sull'ago fino ad avere la conferma uditiva e tattile che lo stesso sia stato attivato



Se necessario la chiusura può essere effettuata anche spingendo la protezione contro una superficie piana come mostrato in figura. Controllare visivamente che l'ago sia coperto.



In caso di mancata attivazione del dispositivo di sicurezza smaltire immediatamente il dispositivo in apposito contenitore per taglienti. Usare la tecnica ad una sola mano e attivare il dispositivo di sicurezza lontano da sé e dagli altri. Per maggiore sicurezza, per attivare il meccanismo di protezione, utilizzare esclusivamente le procedure sopra descritte. Dopo l'utilizzo, smaltire in un apposito contenitore in conformità al regolamento vigente ed alle direttive dell'istituto.

Apirogeno. Non utilizzare se la confezione singola è aperta o danneggiata.
Non contiene lattice e ftalati.

ATTENZIONE

Qualora le procedure locali o dell'istituto consentano/richiedano il trasporto della siringa riempita fino al luogo dell'iniezione, utilizzare una tecnica passiva per il reincappucciamento dell'ago prima del trasporto. Per evitare l'esposizione a malattie infettive (HIV, epatite, ecc.) causate da punture accidentali da ago, attivare il dispositivo di protezione immediatamente dopo l'uso.

Non riutilizzare. Conservazione: Conservare in luogo fresco, asciutto, lontano da fonti di calore, al riparo da polveri, all'interno della confezione originale, lontano da fiamme libere

Rev00 del 01/09/21