

MEDICAZIONE IDROATTIVA CON CARBOSSIMETILCELLULOSA

Descrizione del prodotto

La medicazione per ferite Farmactive CMC è una medicazione sterile in tessuto non tessuto composta al 100% da fibre di carbossimetilcellulosa (CMC). La medicazione per ferite Farmactive CMC è altamente assorbente, conformabile e mantiene la propria integrità allo stato umido. Man mano che l'essudato della ferita viene assorbito, le fibre di CMC formano un gel morbido che contribuisce a mantenere un ambiente umido, supportando il processo di guarigione della ferita e favorendo la rimozione del tessuto devitalizzato, senza danneggiare il tessuto neoformato.

Gruppo di pazienti destinatari

Qualsiasi paziente che presenti una tipologia di ferita appropriata e per il quale non sussistano controindicazioni.

Utilizzatore previsto

La medicazione per ferite Farmactive CMC è destinata all'uso da parte di operatori sanitari.

Indicazioni

La medicazione per ferite Farmactive CMC è destinata alla gestione di ferite con essudato da moderato ad abbondante, ferite croniche a spessore parziale e a tutto spessore e ferite acute.

La medicazione per ferite Farmactive CMC può essere utilizzata sulle seguenti ferite:

- Ulcere degli arti inferiori, ulcere da pressione (stadio II-IV) e ulcere diabetiche.
- Ferite chirurgiche (post-operatorie, ferite lasciate guarire per seconda intenzione e siti donatori)
- Ustioni a spessore parziale
- Ferite traumatiche (abrasioni e lacerazioni) Assorbimento dell'essudato nelle ferite oncologiche (tumori cutanei funganti, metastasi cutanee e sarcomi di Kaposi).

Le altre indicazioni comprendono le ferite cavitare. Le medicazioni possono essere utilizzate sotto bendaggi compressivi.

Controindicazioni

La medicazione per ferite Farmactive CMC non è indicata nei seguenti casi:

- Impianto chirurgico
- Controllo di sanguinamenti importanti
- Soggetti sensibili alla medicazione o che abbiano manifestato una reazione allergica alla stessa.

Precauzioni

Consultare un professionista sanitario in caso di irritazione (arrossamento, infiammazione), macerazione (sbiancamento della cute) o ipergranulazione (formazione di tessuto in eccesso).

La medicazione deve essere utilizzata esclusivamente sotto la supervisione di professionisti sanitari.

La sterilità è garantita, salvo che la busta sia danneggiata o sia stata aperta prima dell'uso.

Adottare adeguate misure di supporto ove indicato (ad es. uso di bendaggi a compressione graduata nella gestione delle ulcere/lesioni da pressione).

La medicazione per ferite Farmactive CMC non è destinata all'uso come tampone chirurgico. Al cambio della medicazione, applicare soluzione fisiologica sterile o acqua per agevolarne la rimozione se la ferita è asciutta.

Poiché la medicazione per ferite Farmactive CMC crea un ambiente umido che favorisce la crescita di nuovi vasi sanguigni. Occasionalmente, i delicati vasi sanguigni neoformati possono produrre un fluido della ferita striato di sangue.

La medicazione per ferite Farmactive CMC è esclusivamente per uso esterno.

La medicazione per ferite Farmactive CMC non è progettata per l'uso permanente.

La medicazione per ferite Farmactive CMC non deve essere utilizzata cumulativamente per più di 30 giorni.

Esclusivamente monouso.

Segnalare al fabbricante e all'autorità locale qualsiasi incidente avverso.

ISTRUZIONI PER L'USO

Preparazione

- Effettuare lo sbrigliamento quando necessario e irrigare la sede della ferita secondo i protocolli standard
- Rimuovere la soluzione in eccesso dalla cute circostante

Applicazione della medicazione:

1. Detergere la ferita secondo le procedure locali;
 2. Selezionare una medicazione di dimensioni adeguate;
 3. Aprire la confezione e posizionare la medicazione sterile sulla ferita;
 4. Nel trattamento di ferite a spessore parziale, la medicazione deve sovrapporsi al margine della ferita di circa 5 cm, poiché può ridursi di dimensioni durante l'assorbimento dell'essudato;
 5. Quando si utilizza la medicazione a nastro Farmactive in ferite cavitare profonde, lasciare almeno 2-3 cm all'esterno della ferita per agevolarne la rimozione. Riempire le ferite profonde solo fino all'80%, poiché la medicazione per ferite Farmactive CMC può espandersi fino a riempire gli spazi della ferita a contatto con l'essudato;
 6. Applicare la medicazione sulla ferita, quindi coprire e fissare con una medicazione secondaria non occlusiva o semi-occlusiva.
- La medicazione per ferite Farmactive CMC può essere lasciata in sede fino a 7 giorni ove clinicamente indicato (ad eccezione delle ustioni, per le quali può essere lasciata in sede fino a 14 giorni).

Rimozione della medicazione:

- Dopo la rimozione della medicazione secondaria:
- Sollevare delicatamente eventuali parti non gelificate della medicazione.
- Irrigare la ferita con soluzione fisiologica sterile (0,9%) per rimuovere eventuali residui di gel rimasti nella sede della ferita.
- - Utilizzare i protocolli clinici vigenti per detergere la ferita, al fine di rimuovere eventuali residui di essudato prima della valutazione della ferita e dell'applicazione di ulteriori medicazioni.

Smaltimento

La medicazione deve essere smaltita in conformità alle linee guida locali in materia di rifiuti.

Conservazione

Conservare in luogo fresco e asciutto. Non riutilizzare; il riutilizzo può causare infezioni gravi. Non risterilizzare

Non utilizzare se la busta singola è danneggiata/aperta. La data di scadenza di questo prodotto è stampata sulla confezione.



 MONOUSO	 NON RISTERILIZZARE	 TENERE AL RIPARO DALLA LUCE SOLARE	 DATA DI PRODUZIONE	 DISTRIBUTORE	 IDENTIFICATORE UNIVOCO DEL DISPOSITIVO	 CONDIZIONI DI CONSERVAZIONE
 ATTENZIONE	 NON USARE SE LA CONFEZIONE È DANNEGGIATA	 STERILE	 DATA DI SCADENZA	 RAPPRESENTANTE AUTORIZZATO DELLA COMUNITÀ EUROPEA	 MARCATURA CE	 CONSULTARE LE ISTRUZIONI PER L'USO
 SENZA LATTICE	 MANTENERE ASCIUTTO	 PRODUTTORE	 IMPORTATORE	 LOTTO	 RIFERIMENTO PRODOTTO	

